


COUSSIN DE GEL SPECIAL ISOPOCKET

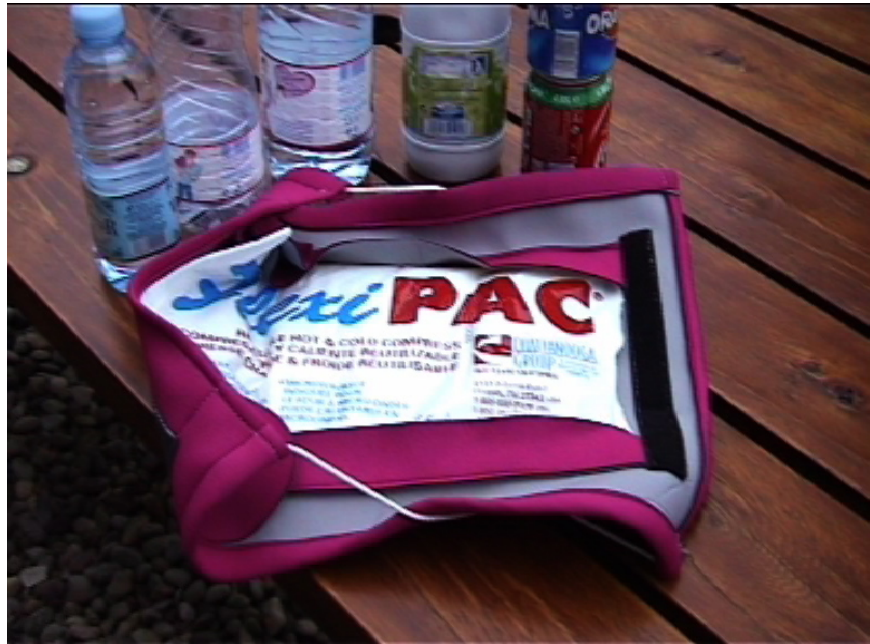

Le coussin de gel spécial est à manipuler avec précaution car les grands changements de température fragilisent l'enveloppe plastique.
Si vous remarquez que l'enveloppe fuit, changez aussitôt le coussin de gel à **un tarif préférentiel.**

Vous pouvez également vous procurer un coussin de gel supplémentaire afin d'en disposer un en permanence au congélateur. Vous pouvez ainsi alterner les packs de gel rafraîchissants autour de votre flacon sans rompre la chaîne du froid. Idem pour l'utilisation en chaîne chaude.

Lors de l'utilisation en thérapie, il est à noter que l'application non contrôlée d'un Flexipac chaud ou froid sur la peau peut provoquer des lésions cutanées. Ne pas ingérer le gel contenu à l'intérieur du Flexipac.

Mode d'emploi :

Utilisation en froid : Placer le coussin de gel au congélateur pendant environ deux heures.

Insérer le coussin adapté dans l'étui Isopocket ;

Renouveler le refroidissement selon la durée d'utilisation.

Utilisation en chaud : placer le coussin de gel dans un four à micron ondes ; régler la puissance sous maximale et chauffer pendant deux minutes environ. Eviter la surchauffe du coussin.

Vous pouvez également faire chauffer le coussin de gel dans une casserole dont l'eau sera portée à ébullition et retirée du feu. Dans ce cas, laisser le flexipac immergé pendant une dizaine de minutes.